

# DIE PASSENDE MASKE FÜR DAS RICHTIGE VERFAHREN



# DAS PERFEKTE GLEICHGEWICHT ZWISCHEN SCHUTZ & KOMFORT

O&M Halyard ist ein führender Anbieter in den Bereichen Infektionskontrolle und OP-Bedarf, sowie in der Bereitstellung von VAP-Lösungen zur Vorbeugung nosokomialer Infektionen. Auf diese Weise trägt Halyard zur Erhöhung der Umgebungssicherheit bei, zum Wohle von Patienten wie Mitarbeitern im Gesundheitswesen. Halyard bietet ein großes Sortiment an Gesichtsmasken unterschiedlicher Designs, Merkmale und Schutzlevel an.



## IHRE ANFORDERUNGEN AN EINE GESICHTSMASKE


Bei der Wahl einer Gesichtsmaske werden folgende Aspekte in Betracht gezogen:

- Erforderlicher Schutz
- Art des Verfahrens
- Tragekomfort & persönliche Präferenzen

## RUNDUMSCHUTZ FÜR PATIENTEN UND MEDIZINISCHES PERSONAL

Das wichtigste Element bei der Wahl einer Gesichtsmaske ist das Vertrauen in den angemessenen Schutz sowohl des Patienten als auch des medizinischen Personals. Bei der Wahl Ihres Gesichtsschutzes sind folgende Fragen zu berücksichtigen:

- Welche über die Luft übertragbaren Infektionsrisiken bestehen?
- Besteht das Risiko eines Kontakts mit Körperflüssigkeiten?
- Ist ein Augenschutz erforderlich?
- Hat der Patient Atemwegssymptome?
- Kann es zu einer Exposition gegenüber Dämpfen durch Laserbehandlung oder Elektrokauterisation kommen?

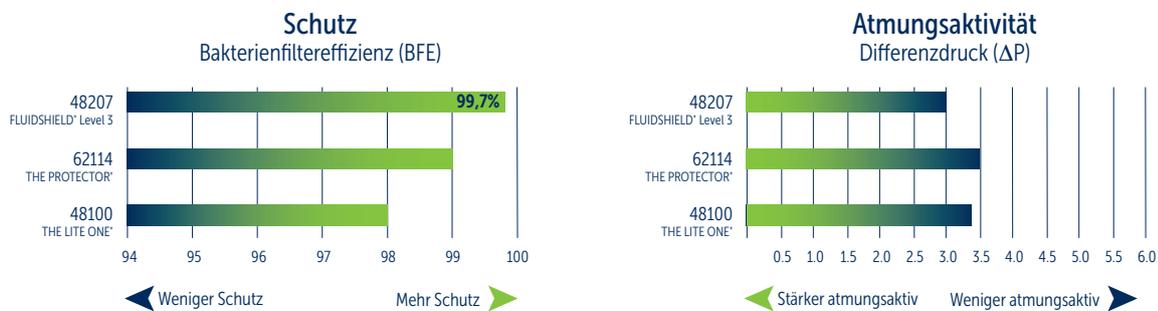

Diese Tabellen veranschaulichen Schutzwirkung und Atmungsaktivität einiger unserer Gesichtsmasken und zeigen die Korrelation zwischen Schutz und Atmungsaktivität.

## ART DES VERFAHRENS

Bei der Wahl der geeigneten Gesichtsmaske müssen die Routineverfahren genau beleuchtet werden, d.h. welche Risiken/Expositionen die Verfahren beinhalten und wo sie stattfinden.

- Wie lange dauern die Verfahren?
- Ist das Verfahren flüssigkeitsintensiv und besteht ein Spritz- und Sprüherisiko?
- Kann es zur Aerosol-Exposition kommen?
- Gibt es seitens Ihrer Einrichtung oder Ihres Berufsverbandes Regelwerke oder Standards zu diesen Verfahren?

## TRAGEKOMFORT & PERSÖNLICHE PRÄFERENZEN

Die Atmungsaktivität wird als Differenzdruck oder  $\Delta P$  gemessen (Druckunterschied zwischen dem Inneren und dem Äußeren der Maske beim Luftaustausch). Je niedriger der  $\Delta P$ -Wert, desto luftdurchlässiger die Maske. Ist eine ausreichend kühle und unbehinderte Atmung möglich, fördert dies die Compliance der Mitarbeiter, die Maske auch wirklich zu tragen – ein wesentlicher Schutzfaktor.

- Wie atmungsaktiv ist eine Maske?
- Aus welchen Materialien besteht sie?

Ebenso wie Verfahren und Umgebungsbedingungen variieren, gibt es auch unterschiedliche individuelle Bedürfnisse und Präferenzen. Der einzig maßgebliche Faktor dafür, ob eine Maske angenehm für den Träger ist, besteht darin ob sie ihn bequem und entspannt arbeiten lässt. Wir alle haben unseren eigenen Stil, unsere Vorlieben und Abneigungen. Bei den Gesichtsmasken gibt es höchst individuelle Präferenzen der medizinischen Mitarbeiter.


# HALYARD: DIE PASSENDE MASKE FÜR DAS RICHTIGE VERFAHREN



O&M Halyard Gesichtsmasken entsprechen den geltenden Industrienormen und Bestimmungen wie der EN 14683:2019+AC:2019 und der EN 149:2001+A1:2009 für die spezifische klinische Anwendung. Die Materialien und Befestigungsansätze sind mittels Ultraschallverbindung miteinander verbunden. Alle Masken<sup>1</sup> werden mit einem beigefügten Nasenbügel zur Anpassung an die Gesichtskonturen geliefert. Alle HALYARD\* Gesichtsmasken sind naturkautschuklatexfrei und DEHP-frei.

## PRODUKTÜBERBLICK


---

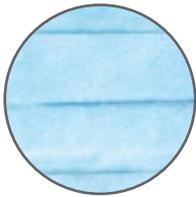

### STANDARD-GESICHTSMASKEN

Schutz in der allgemeinen Patientenversorgung

- Dreilagiger Schutz
- Risikofreie Exposition gegenüber Blut und/oder Körperflüssigkeiten
- Geeignet für die allgemeine Patientenversorgung und für die Isolierstation

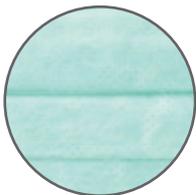

### SPEZIAL-GESICHTSMASKEN

Mit speziellen Merkmalen für ein breites Spektrum an individuellen und klinischen Leistungsanforderungen

- Weniger Beschlag
- Größere Atemkammern für erhöhten Komfort
- Patentierte Designs zu verbesserten Gesichtspassung



### FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIGE GESICHTSMASKEN

Vollständige Produktfamilie flüssigkeitsbeständiger Gesichtsschutzmasken. Die FLUIDSHIELD\* Level 2 & 3 Artikel entsprechen den EN 14683:2019+AC:2019 Typ IIR Standards für Masken zum Schutz vor Blut und Körperflüssigkeiten.


- Bestehen aus einer patentierten Materialkombination zur Beständigkeit gegenüber einwirkenden Flüssigkeiten
- Mit POWERGUARD\* Technologie
- Einige verfügen über ein Blendschutz-Visier
- Große Auswahl an Ausführungen und Merkmalen



### PARTIKELFILTRIERENDE ATEMSCHUTZMASKEN

Getestet und zugelassen gemäß EN 149:2001+A1:2009 für partikelfiltrierende Halbmasken. HALYARD\* FFP Schutzmasken bieten eine effektive Anpassung an das Gesicht, wie sie für einen angemessenen Atemschutz vor Erregern in der Luft erforderlich ist.

- Mit großer Atemkammer
- Enger Sitz am Gesicht mit weicher Innenschicht

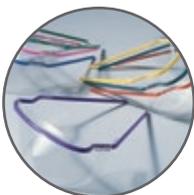

### AUGENSCHUTZ UND VISIERE

Bei möglicher Exposition gegenüber verspritzendem Blut und/oder Körperflüssigkeiten

- Leichte Augenschutzbrillen mit bunten Rahmen
- Einweg-Visiere lassen sich leicht im Rahmen auswechseln
- Gesichtsvisiere sind mit Schaumstoffstreifen und Kopfband versehen
- Können mit Brille oder Schutzbrille getragen werden



# HALYARD\* STANDARD GESICHTSMASKEN

## SCHUTZ FÜR DIE ALLGEMEINE PATIENTENVERSORGUNG IN UNTERSCHIEDLICHEN UMGEBUNGEN

	OP-Masken	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
	<b>SOFT TOUCH* II OP-MASKE, BLAU</b> Beschreibung: mit horizontalen Bändern, gefaltet	II	47500	50	6
	<b>THE LITE ONE* OP-MASKE, BLAU</b> Beschreibung: mit Bändern, gefaltet	II	48100	50	6
	<b>TEDDYBEAR* OP-MASKE</b> Beschreibung: -Aufdruck (rosa/blau)	II	48296	50	6
	<b>DUCKBILL* SURGICAL MASK, GRÜN</b>	I	37525	50	6
	<b>DUCKBILL* SURGICAL MASK, SCHAUMSTOFFSTREIFEN, BLAU</b> Beschreibung: mit Bändern, Schnabelformat	II	49216	50	6



# HALYARD\*

## GESICHTSSCHUTZ

	Prozedurenmasken	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
	PROZEDURENMASKE, BLAU	I	47080	50	10
	PROZEDURENMASKE, GELB	I	47117	50	10
	Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet				
	TEDDY BEAR® PROZEDURENMASKE	II	47295	50	10
	Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet, Teddybär-Aufdruck (rosa/blau)				
	Teddy Bear SO-SOFT® KINDERMASKE	I	47359	75	10
	Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet, Teddybär-Aufdruck (rosa/blau)				
	THE LITE ONE® PROZEDURENMASKE, BLAU	II	62356	50	10
	Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet				



# HALYARD\* SPEZIAL-GESICHTSMASKEN

**MIT SPEZIELLEN MERKMALEN FÜR EIN BREITES SPEKTRUM AN INDIVIDUELLEN UND KLINISCHEN LEISTUNGSANFORDERUNGEN**

    	<b>OP-Masken</b>	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
	FOG-FREE ULTI-MASK* OP-MASKE, ANTIBESCHLAGSBAND, WEIß	II	49310	50	6
	Beschreibung: mit Bändern, gefaltet				
	FOG-FREE OP-MASKE, ANTIBESCHLAGSBAND, BLAU	II	49214	50	6
	Beschreibung: mit Bändern, gefaltet				
	ANTI-FOG OP-MASKE, DERMA-TOUCH* TAPE, GRÜN	II	49215	50	6
Beschreibung: mit Bändern, gefaltet					
ANTI-FOG OP-MASKE, ANTIBESCHLAGSFILM, GRÜN	II	49235	50	6	
Beschreibung: mit Bändern, gefaltet					
SO SOFT* OP-MASKE, WEIß	II	48390	50	6	
Beschreibung: mit Bändern, gefaltet					
 	<b>FOG-FREE Prozedurenmasken</b>	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
	SO SOFT* FOG-FREE PROZEDURENMASKE, ANTIBESCHLAGS-BAND, WEIß,	II	62363	50	10
	Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet				
	<b>PCM2000*-Masken</b>	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
	PCM2000* MASKE, UNIVERSAL, BLAU	II	47700	50	6
	PCM2000* MASKE, UNIVERSAL, GELB	II	47717	50	6
Beschreibung: mit Polyurethan-Kopfbändern, Schnabelformat					



# HALYARD\* FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIGE GESICHTSMASKEN

## VOLLSTÄNDIGE PRODUKTFAMILIE FLÜSSIGKEITS-BESTÄNDIGER GESICHTSSCHUTZMASKEN



### FLUIDSHIELD\* LEVEL 3 OP-Masken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SO SOFT* FLUIDSHIELD* FOG-FREE OP-MASKE, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	48207	50	6
SO SOFT* FLUIDSHIELD* OP-MASKE	IIR	48208	50	6

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, orange



SO SOFT\* FLUIDSHIELD\* FOG-FREE OP-MASKE, SPLASHGUARD\* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND

SO SOFT\* FLUIDSHIELD\* FOG-FREE OP-MASKE, RUNDUM SPLASHGUARD\* VISIER, BLENDSCHUTZ, ANTIBESCHLAGSBAND

FLUIDSHIELD\* FOG-FREE OP-MASKE, RUNDUM SPLASHGUARD\* VISIER, BLENDSCHUTZ, ANTIBESCHLAGSBAND

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, orange



### FLUIDSHIELD\* LEVEL 3 Prozedurenmasken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
SO SOFT* FLUIDSHIELD* FOG-FREE PROZEDURENMASKE, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	47107	40	10
SO SOFT* FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE, SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	47137	25	4
SO SOFT* FLUIDSHIELD* FOG-FREE PROZEDURENMASKE, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	47147	25	4

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet, orange



### FLUIDSHIELD\* LEVEL 3 OP-Masken

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* OP-MASKE, GRÜN	-	28806	50	6

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet



# HALYARD\* FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIGE GESICHTSMASKEN

## VOLLSTÄNDIGE PRODUKTFAMILIE FLÜSSIGKEITS-BESTÄNDIGER GESICHTSSCHUTZMASKEN



FLUIDSHIELD* LEVEL 1 Prozedurenmasken	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE, GELB	-	25867	50	10
FLUIDSHIELD* PROZEDURENMASKE, BLAU	-	25869	50	10

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet



FLUIDSHIELD* SPECIALTY Prozedurenmasken	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* TEDDY BEAR* PROZEDURENMASKE	IIR	47297	40	10
SO SOFT* FLUIDSHIELD* 3 TEDDY BEAR OP-MASKE	IIR	48297	50	6
FLUIDSHIELD* FOG-FREE TEDDY BEAR* PROZEDURENMASKE, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	47298	25	4

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet, Teddybär-Aufdruck (rosa/blau)



FLUIDSHIELD* LEVEL 2 OP-Masken <sup>i</sup>	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* 2 FOG-FREE OP-MASKE, FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG	IIR	62113	50	6

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, blau mit orangefarbigem Diamanten-Aufdruck



FLUIDSHIELD* 2 FOG-FREE OP-MASKE, FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND	IIR	62114	25	4
--	-----	-------	----	---

Beschreibung: mit Bändern, gefaltet, blau mit orangefarbigem Diamanten-Aufdruck



FLUIDSHIELD* LEVEL 2 Prozedurenmasken <sup>i</sup>	TYP	TYP	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FLUIDSHIELD* 2 PROZEDURENMASKE, FLÜSSIGKEITS-BESTÄNDIG, BLAU	IIR	62115	50	10

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet

FLUIDSHIELD* 2 FOG-FREE PROZEDURENMASKE, FLÜSSIGKEITSBESTÄNDIG, RUNDUM SPLASHGUARD* VISIER, ANTIBESCHLAGSBAND, BLAU	IIR	62116	25	4
---	-----	-------	----	---

Beschreibung: mit Ohrenschlaufen, gefaltet

<sup>i</sup>Früher bekannt als THE PROTECTOR\* Masken



# HALYARD\* PARTIKELFILTRIERENDE ATEMSCHUTZMASKEN / AUGENSCHUTZ & VISIERE



## Partikelfiltrierende Atemschutzmasken (EN 149:2001+A1:2009)

	TYP	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
FFP2 NR FILTRIERENDE HALBMASKE NR FLUIDSHIELD* 3 CHIRURGISCHE ATEMSCHUTZMASKE, GELB	IIR	62408	50	6
FFP3 NR, PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKE, MIT VENTIL, WEIß	-	62360	20	12



## SAFEVIEW\* Augenschutz

	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
50 fertigmontierte Schutzbrillen	SV50A	10	5
Beschreibung: 50 fertigmontierte Schutzbrillen, verschiedene Farben			



<b>Rahmen</b>	SV100F	10	10
Beschreibung: 100 Rahmen, verschiedene Farben			
<b>Ersatzvisiere</b>	SV250L	25	10
Beschreibung: 250 Ersatzvisiere, klar			



## GUARDALL SHIELD\* Visiere

	ART.-NR.	STÜCK/ PACKUNG	PACKUNGEN/ KARTON
GUARDALL SHIELD*	41204	40	1
Beschreibung: Visier, volle Länge (keine Maske)			
GUARDALL SHIELD*	41205	40	1
Beschreibung: Visier, 3/4-Länge (keine Maske)			



## GESICHTSMASKENSPENDER

	ART.-NR.	SPENDER/KARTON
SOFT TOUCH* II OP-MASKENSPENDER	FD001	3
VISIERMASKENSPENDER	FD002	3
OP-MASKENSPENDER	FD003	3
PROZEDURENMASKENSPENDER	FD004	3
ATEMSCHUTZ-/PCM2000*-MASKENSPENDER	FD005	3

Weitere Informationen erhalten Sie über unser Halyard Customer Care Team:

**DE (gebührenfrei)**

**Tel: 0800 071 35 52 - Fax: 0800 100 68 14**

**[kundendienst@hyh.com](mailto:kundendienst@hyh.com)**

**Aus anderen Ländern**

**Tel: +32 2 585 51 14 - Fax: +32 2 897 00 95**

**[customerservice.export@hyh.com](mailto:customerservice.export@hyh.com)**

\*Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen.

©2018. Alle Rechte vorbehalten. HC342-07-DE